

# MANUEL D'UTILISATION



Nosiboo aspirateur nasal adapté aux enfants

# Table des matières

Contenu de l'emballage	3
Préface	3
Signes précurseurs et de sécurité	3
Précautions de sécurité importantes	4
1. Utilisation prévue	5
2. Introduction du produit	7
3. Mise en service	7
4. Instructions for use	8
5. Pannes et problèmes	10
6. Entretien et stockage	13
7. Nettoyage	13
8. Informations importantes concernant la réduction des interférences électromagnétiques	14
9. Environnement	15
10. Spécifications techniques	15
11. Accessoires et pièces de rechange	15

## Contenu de l'emballage

- \* Tête Colibri \* Cordon d'alimentation \* Manuel d'utilisation \* Boîtier de l'appareil \* Tube d'aspiration
- \* Pièce détachée bec flexible

## Préface

Chère cliente, cher client !

Nous vous félicitons pour avoir choisi d'acheter le Nosiboo aspirateur nasal adapté aux enfants, lauréat du prix de design « Red Dot ».

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi afin d'assurer l'utilisation de cet aspirateur nasal pendant des années et en gardant la santé de vos enfants.



**Nous vous prions de bien vouloir lire attentivement ce manuel d'utilisation avant l'utilisation de l'appareil.**

## Signes précurseurs et de sécurité

Sur l'étiquette de l'appareil et dans le manuel d'utilisation vous trouvez les symboles suivants:

### Explication



- \* Pièces appliquées de type BF (protection élevée contre les chocs électriques)



- \* Instrument de classe II (double isolation)



- \* Nom et l'adresse du fabricant



- \* Veuillez lire le manuel d'utilisation!



- \* Avertissement!

**REF** \* Référence produit

**SN** \* Numéro de série (numéro de production)



- \* Gardez l'appareil à l'abri de l'humidité!

**IP21** \*

Le boîtier est conçu pour empêcher la pénétration d'objet de plus de 12,5mm de diamètre et des gouttes d'eau d'une direction verticale.

on 1 min /  
off 50 min

- \* Appareil de fonctionnement intermittent

## Précautions de sécurité importantes



### **Avertissement :**

**Si les situations dangereuses suivantes ne sont pas évitées, des blessures ou même des accidents graves peuvent se produire.**

### *Usage général*

- \* L'appareil est conçu pour le nettoyage du nez des enfants ! Toute autre utilisation est interdite !
- \* L'usage de l'appareil en environnement humide (salle de bain, ...) est INTERDIT !
- \* Dans le cas de pénétration des liquides ou d'objets dans le boîtier, n'utilisez plus l'appareil et contactez le service après-vente !
- \* L'appareil doit être manipulé par un adulte !
- \* Utilisez l'appareil dans une position stable, posé sur une surface horizontale !
- \* Pendant l'usage de l'appareil ne couchez pas l'enfant et ne bloquez pas la narine libre !
- \* Ne pas laisser des enfants ou des personnes avec des capacités physiques ou mentales réduites utiliser l'appareil sans surveillance !
- \* Ne laissez pas l'appareil sans surveillance à proximité d'animaux de grande taille qui peuvent le renverser !
- \* Le câble d'alimentation peut facilement s'enrouler autour du cou de l'enfant !
- \* Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement riche en oxygène !
- \* Afin d'éviter un usage trop intensif, l'appareil s'éteint automatiquement 1,5-2 minutes après la mise en marche. Après cette coupure automatique, l'appareil peut être ré-allumé (dépendant de la puissance d'aspiration 3-15 fois). Après cela, l'usage est bloqué par le système électronique pendant env. 50 minutes. Voir la description détaillée du chapitre 4 de ce manuel.
- \* Avant l'usage, contrôlez que toutes les pièces de l'appareil sont bien connectées !
- \* Avant l'usage contrôlez qu'après le nettoyage vous avez bien inséré le tube de succion dans l'intérieur de la tête Colibri.
- \* N'utilisez pas la tête et l'appareil sans le tube de succion avec collet !
- \* Si vous utilisez une solution physiologique, n'ajoutez pas plus de 5 ml, parce que la solution peut pénétrer dans le tube d'aspiration et endommager l'appareil.
- \* Le point de connexion du tube d'aspiration de la tête Colibri doit être orienté vers le bas pendant l'utilisation.
- \* Si le mucus nasal ou la solution physiologique a pénétré le tube d'aspiration, arrêtez l'appareil immédiatement, débranchez l'appareil, puis videz, rincez et séchez la tête et le tube, vérifiez le filtre; si le filtre est mouillé ou bouché, remplacez-le avant le prochain usage !
- \* Vérifiez avant l'usage si le boîtier de l'appareil, le tube d'aspiration et la tête Colibri ne sont pas endommagés ou cassés ! Si l'appareil est endommagé, ne l'utilisez pas ! Remplacez la partie endommagée ! (Veuillez trouver la liste des pièces de rechange dans le chapitre « Accessoires et pièces de rechange ».)
- \* Si après avoir utilisé l'appareil vous découvrez boutons ou érythème sur la peau de votre enfant, n'utilisez plus l'appareil ! Consultez votre médecin avec votre enfant !
- \* Avec l'appareil utilisez uniquement le tube d'aspiration et la tête fournis par le fabricant !
- \* N'utilisez pas la tête branché sur un autre appareil !

### *Branchement au secteur*

- \* Protégez le cordon d'alimentation contre tout mauvais traitement ! Attention de ne pas endommager le cordon, ne posez pas d'objets lourds dessus parce qu'un câble rompu peut provoquer des chocs électriques !
- \* Maintenez le cordon d'alimentation à l'écart de la chaleur (p.ex. radiateur, cheminée) parce que cela peut endommager l'isolation !
- \* Veuillez utiliser l'appareil exclusivement avec un tube d'aspiration sec !
- \* Ne pas enlever les vis de fixation du boîtier de l'appareil ! Ne pas utiliser cet appareil pour des usages autres que ceux conseillés dans ce manuel.
- \* L'usage de l'appareil est interdit en cas de bris ou fissures sur le boîtier ou le cordon d'alimentation résultant d'une mauvaise utilisation.
- \* En cas de défaillances imprévues, arrêtez immédiatement l'appareil et interrompez l'alimentation électrique en débranchant l'appareil de la prise de courant !

### *Précautions avant la réutilisation*

- \* Désinfectez la tête après chaque usage !
- \* Ne laissez pas les pièces désassemblées de la tête Colibri près de l'enfant parce que les pièces peuvent être avalées !

### *Précautions générales*

- \* Lisez et suivez les instructions dans le chapitre « Informations importantes concernant la réduction des interférences électromagnétiques ».
- \* Si vous envisager de jeter l'appareil ou une partie de l'appareil, lisez et suivez les instructions dans le chapitre « Observations environnementales ».

## 1. Utilisation prévue

Le Nosiboo aspirateur nasal adapté aux enfants, est prévue uniquement pour enlever le mucus nasal des enfants.

Le vide et le débit d'air nécessaire pour le nettoyage est créé par un appareil de succion exclusivement développé pour cet objectif. Cet appareil de succion est branché sur la tête Colibri avec un tube d'aspiration. La construction brevetée de la tête Colibri empêche la pénétration du mucus nasal dans l'appareil de succion.

*Destination prévue :*

- \* faciliter la respiration nasale des bébés
- \* prévenir des complications causées par le rhume banal et permettre une guérison plus rapide en enlevant le mucus nasal
- \* soulager les symptômes allergiques chez les enfants en enlevant le mucus nasal

*Groupe de patients à traiter :*

- \* enfants (généralement à un âge inférieur 6 ans) qui ne parviennent pas à enlever le mucus nasal en se mouchant

*Maladies et condition nécessitant un traitement (indication) :*

- \* élimination d'obstruction nasale
- \* traitement du rhume banal et des infections des sinus maxillaires
- \* traitement complémentaire des allergies

*Contre-indications :*

- \* hémophilie
- \* vaisseaux dilatés de la muqueuse de la cloison nasale – saignements de nez fréquents
- \* traitements médicamenteux aux anticoagulants
- \* malformations congénitales (p.ex. fissure palatine)

*Utilisateur recommandé :*

- \* Age : adultes de plus de 18 ans
- \* Sexe : inapplicable (femmes ou hommes)
- \* Connaissances : connaissances générales en fonction de l'âge
- \* Education : enseignement primaire; aucune connaissance spéciale n'est nécessaire pour l'usage du produit.
- \* Connaissance du manuel d'utilisation compris dans l'emballage de l'appareil.

## 2. Introduction du produit

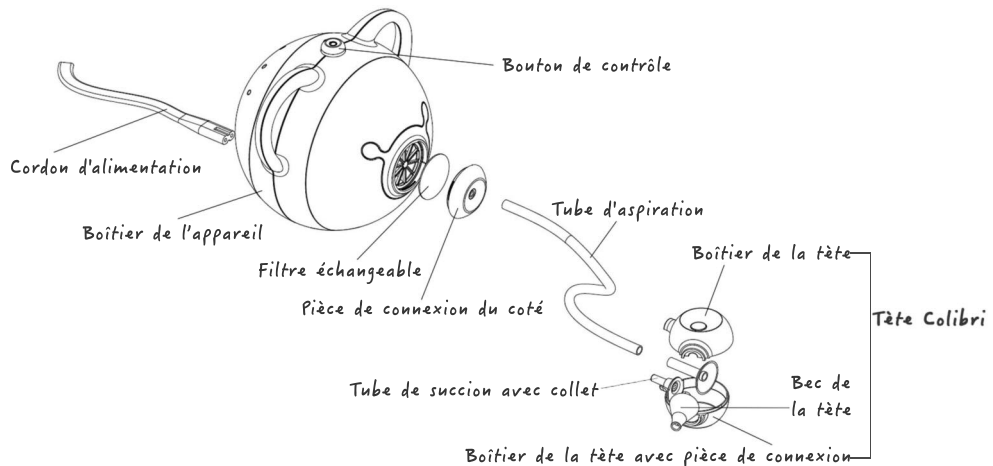


Figure 1 – Nosiboo aspirateur nasal adapté aux enfants

## 3. Mise en service

### Assemblage de la tête Colibri

1. Nettoyez les parties de la tête (voir chapitre « Nettoyage et l'entretien »).
2. Insérez le tube de succion avec collet dans le boîtier de l'embout.
3. Placer la pièce du côté de l'embout sur sa place.
4. Poussez l'extrémité flexible de l'embout sur la bordure.
5. Brancher le tube d'aspiration sur la tête.

### Connexion de l'appareil

6. Connectez l'extrémité libre du tube d'aspiration avec le boîtier.
7. Branchez une extrémité du cordon d'alimentation de 230 V dans la prise sur le dos de l'appareil en bas, puis insérez l'autre extrémité dans une prise électrique.

L'appareil est prêt à être utilisé.

## 4. Utilisation de l'appareil

Avant l'usage, placez l'appareil de façon à pouvoir le débrancher facilement de la prise ! Vous pouvez allumer ou éteindre l'appareil en appuyant sur le bouton en haut du boîtier, et contrôler la puissance d'aspiration en le tournant à droit ou gauche. Ce système ajustable garantit qu'en choisissant la puissance d'aspiration appropriée les parents ne peuvent pas causer des déformations secondaires dans le nez. Avant d'allumer l'appareil, vérifiez que le débit d'air correspond à l'âge de votre enfant selon la figure ci-dessous.

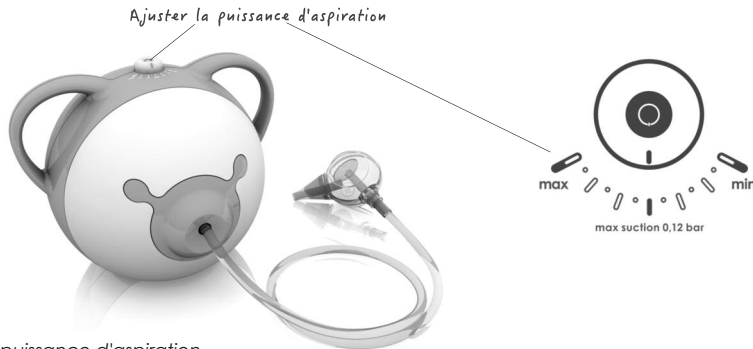


Figure 2 – Ajuster la puissance d'aspiration

La valeur minimale est recommandée pour les nouveau-nés, la valeur moyenne pour les bébés, et la valeur maximale pour les enfants plus âgés. L'efficacité de l'appareil est fortement influencée par la consistance du mucus, le type de la maladie, et l'anatomie unique de votre enfant. Si le mucus est d'une consistance faible, vous pouvez utiliser l'appareil avec une puissance d'aspiration moins forte; et plus forte si la consistance est plus importante.

L'appareil ne doit être manipulé que par des adultes, ne laissez pas votre enfant jouer avec l'appareil !

Utilisez l'appareil en gardant l'enfant dans une position assise stable. Placez l'enfant sur vos genoux ou posez l'enfant dans une chaise en soutenant son dos avec un oreiller.



Ne couchez pas l'enfant et ne bloquez pas la narine libre !

Insérez la tête Colibri dans la narine de l'enfant et allumez l'appareil en appuyant sur le bouton de régulation (l'appareil utilise la puissance d'aspiration réglée précédemment).



*Le positionnement correct de la tête Colibri:*

Insérez la tête Colibri dans la narine en appuyant vers le bas et l'extérieur, vers le globe oculaire. Ici vous pouvez déplacer doucement la tête Colibri. A l'aide de cette méthode vous permettez l'ouverture du sinus maxillaire sans endommager la muqueuse des cornets nasaux ou les capillaires de la cloison nasale.

Le point de connexion du tube d'aspiration doit être orienté vers le bas pendant l'usage.

La construction brevetée de la tête Colibri permet de maintenir un liquide même d'une consistance moins concentrée jusqu'à 5 ml en prévenant la pénétration du mucus dans le tube d'aspiration.

Le mucus nasal concentré et sec peut être dissout avec des solutions physiologiques. Si vous utilisez des solutions, n'ajoutez pas plus de 5 ml parce que la solution peut pénétrer le tube d'aspiration et endommager l'appareil.

Après avoir injecté la solution physiologique, attendez quelques minutes et enlevez le mucus coulant du nez avec un mouchoir, puis utilisez l'aspirateur nasal.



*Figure 3 – Le positionnement correct de la tête Colibri*

*Les gouttes nasales ou autres médicaments suggérés par le médecin doivent être utilisées toujours après l'aspiration !*

La durée suggérée de l'aspiration est de 10 secondes par narine ; n'utilisez pas l'appareil plus de 80 secondes à la fois. En cas d'une utilisation excessive, l'appareil s'éteint automatiquement pour des raisons de sécurité, et peut être allumé seulement après un temps déterminé.

Si vous êtes obligés d'interrompre l'aspiration, éteignez l'appareil. Dès que le moteur s'est arrêté complètement, vous pouvez recommencer la durée de traitement de 1 minute et 20 secondes. Si vous utilisez l'appareil plus longtemps qu'une minute et 20 secondes, la puissance diminue de 45% en signalant que le temps préconisé de traitement est fini. Dans ce cas l'appareil peut être redémarré, mais dépendant de la puissance d'aspiration pour des temps limités.



Ne laissez pas l'appareil connecté au réseau électrique après l'utilisation !

Quelques exemples pour les redémarrages\* :

### Taux maximal

Après le temps de traitement d'une minute et 20 secondes vous pouvez redémarrer l'appareil 2 fois.

### Taux moyen

Après le temps de traitement d'une minute et 20 secondes vous pouvez redémarrer l'appareil 5 fois.

### Taux minimal

Après le temps de traitement d'une minute et 20 secondes vous pouvez redémarrer l'appareil 10-14 fois.

\* Dépendant de la consistance du mucus

Vous pouvez utiliser le Nosiboo aspirateur nasal adapté aux enfants plusieurs fois par jours, le but général de son emploi c'est la bonne respiration de votre enfant. Il est suggéré de libérer les voies respiratoires après le réveil, et avant les repas et avant de dormir.

Ne causez aucune douleur à l'enfant, faites découvrir l'appareil à votre enfant en jouant.

Après l'usage éteignez toujours l'appareil en appuyant sur le bouton de contrôle !

Le moteur continue son opération pour un temps donné afin d'assurer un refroidissement adéquat.

Ne débranchez pas l'appareil jusqu'à son arrêt complet !

Ne couvrez pas les ouvertures de ventilation en arrière de l'appareil pendant l'opération !

*Gamme de performance recommandée:*

- \* 0,04 à 0,12 bar (140 à 215 W). Utilisez les valeurs les moins élevées pour les bébés, les plus élevées pour les enfants de 4 ans ou plus.
- \* L'intensité de succion est fortement influencée par la consistance du mucus et le type de la maladie.

## 5. Pannes et problèmes

Si vous soupçonnez des pannes pendant l'utilisation de l'appareil Nosiboo, nous vous prions de bien vouloir lire les deux chapitres suivants. Premièrement le *Guide de dépannage*, vous donnera des suggestions pour résoudre les problèmes rencontrés. Dans le tableau ci-dessus vous aller voir les problèmes avec des suggestions de dépannage. Si ces suggestions ne suffisent pas, veuillez consulter le *Guide de gestion des dysfonctionnements* afin de localiser le problème le plus vite possible et évaluer la nécessité de remplacer l'appareil. Nous vous prions de bien vouloir lire les chapitres mentionnés attentivement.

Guide de dépannage

Problème	Raison	Suggestion
L'appareil ne se met pas en marche.	Le connecteur réseau n'est pas branché.	Branchez le cordon d'alimentation à la prise de l'appareil, puis la fiche secteur dans une prise de 230 V.
L'appareil ne se met pas en marche.	Après une utilisation excessive l'appareil s'est éteint automatiquement pour des raisons de sécurité.	Pour la santé de l'enfant, interrompez l'utilisation de l'appareil. Après env. 50 minutes vous pouvez utiliser l'appareil de nouveau.
La puissance d'aspiration a diminuée.	La tête est bloqué ou l'assemblage n'est pas correct.	Désassemblez et nettoyez la tête, puis l'assembler en suivant les instructions fournies dans le manuel d'utilisation.
La puissance d'aspiration a diminuée.	Le filtre est usagé.	Échangez le filtre en suivant les instructions fournies dans le chapitre « Entretien et stockage ».
Mucus ou liquide dans le tube d'aspiration.	Positionnement incorrecte de la tête. Le point de connexion du tube d'aspiration ne pointe pas vers le bas pendant l'usage.	Eteignez l'appareil, puis nettoyez et séchez la tête et le tube d'aspiration. Vérifiez le filtre, échangez-le si nécessaire.
Mucus ou liquide dans le tube d'aspiration.	Vous avez utilisé trop de solution physiologique.	Utilisez une quantité inférieure à 5 ml. Eteignez l'appareil, puis nettoyez et séchez la tête et le tube d'aspiration. Vérifiez le filtre, échangez-le si nécessaire.

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement après avoir consulté les suggestions ci-dessus, consultez le *Guide de gestion des dysfonctionnements* avec le distributeur/commerçant de l'appareil.

*Guide de gestion des dysfonctionnements*

La garantie est valable pendant 12 mois à partir de la date d'achat. La garantie est uniquement valable si l'appareil a été utilisé conformément à sa destination et ne porte pas des dommages visibles. Dans l'étape suivante, il faut vérifier l'existence du dysfonctionnement. Puis il faut vérifier si le dysfonctionnement a été causé par l'utilisateur ou non. Le fabricant fournit une garantie de remplacement de 12 mois en cas d'une utilisation conforme de l'appareil. Chaque utilisateur peut effectuer les contrôles suivants à la maison ou chez le distributeur ou son mandataire après la présentation de la carte de garantie et de la facture. Le distributeur ou son mandataire sont obligés de remplir la carte de garantie fournie avec le manuel d'utilisation ou la documentation de garantie qu'ils utilisent. Ils doivent précisément documenter le processus de dépannage et envoyer cette documentation au fabricant dans un délai de 24 heures.

## Dépannage

## Description détaillée

## Tâches de garantie

### Contrôle visuel

L'intégrité de l'étiquette sur le dessous de l'appareil.

Les signes de dommages sur l'étiquette indiquent l'ouverture du boîtier.

Pour cause d'une mauvaise utilisation la garantie de remplacement n'est pas valide.

Autre signes de dommage sur le boîtier : rayures, bosselures, signes de meurtrissures et rayures autour des vis.

Les signes de dommage sur le boîtier indiquent son ouverture.

Pour cause d'une mauvaise utilisation la garantie de remplacement n'est pas valide.

Signes des contaminations fortes sur ou autour du filtre. Dommage sur l'ouverture derrière le filtre, traces des matériaux étrangers dans l'appareil.

Les contaminations fortes et les matériaux étrangers dans le boîtier indiquent une mauvaise utilisation de l'appareil.

Pour cause d'une mauvaise utilisation la garantie de remplacement n'est pas valide.

Toute sorte de contamination du tube d'aspiration.

Les contaminations présentes dans le tube d'aspiration indiquent une mauvaise utilisation de l'appareil.

Pour cause d'une mauvaise utilisation la garantie de remplacement n'est pas valide.

### Contrôle manuel

Avant d'utiliser l'appareil, contrôlez la connexion du cordon d'alimentation avec l'appareil.

Si la connexion (pas le cordon d'alimentation) est endommagée, déplacée ou enlevée, l'utilisation de l'appareil peut mettre la vie de l'utilisateur en danger ! Les dommages de ce type résultent d'un impact externe et ne sont pas couverts par la garantie.

Pour cause d'une mauvaise utilisation la garantie de remplacement n'est pas valide.

Un dommage de tout autre type de bouton de contrôle en haut du boîtier.

Si le bouton de contrôle est endommagé, déplacé, coincé ou absent, le dysfonctionnement est due à des causes extérieures et la garantie n'est pas valable. Dans ce cas l'utilisation de l'appareil peut mettre la vie de l'utilisateur en danger !

Pour cause d'une mauvaise utilisation la garantie de remplacement n'est pas valide.

### La mise sous tension / allumer

Pour la mise sous tension de l'appareil utilisez le cordon d'alimentation original fourni avec l'appareil.

Si l'appareil ne démarre pas dans ces conditions, il est nécessaire de remplacer le cordon d'alimentation (non couvert par la garantie). Les dommages de ce type résultent d'un impact externe et ne sont pas couverts par la garantie.

Pour cause d'une mauvaise utilisation la garantie de remplacement n'est pas valide.

La mise sous tension est possible mais après l'allumage de l'appareil il y a une anomalie.

Si pendant l'usage de l'appareil il y a des phénomènes « inhabituels », p.ex. puissance d'aspiration faible, fumée, odeur forte, des bruits ou sons de bourdonnement, circuit qui est coupé, incapacité du réglage en utilisant le bouton de contrôle ou l'appareil ne s'arrête pas après 1,5 minute.

**Si pendant l'usage de l'appareil il y a des phénomènes « inhabituelles » et le boîtier ne comporte pas des signes de dommages extérieurs mentionnés dans les premiers deux points, l'acheteur est éligible au remplacement immédiat. Le remplacement est géré par le distributeur, les coûts doivent être supportés par le fabricant.**

## Tâches de garantie

Le distributeur de l'appareil Nosiboo est obligé de traiter les plaintes des clients immédiatement basées sur les aspects inclus dans les chapitres Guide de dépannage et Guide de gestion des dysfonctionnements dans le Manuel d'utilisation. Si les conditions de garantie sont remplies, l'appareil doit être remplacé immédiatement. Le distributeur de l'appareil est obligé de consigner par écrit les mesures de dépannage prises. Cette tâche peut être effectuée dans le cadre de la documentation interne du distributeur ou avec la carte de garantie fournie dans le Manuel d'utilisation. Toutes réclamations doivent contenir le dysfonctionnement découvert, la date précise et le numéro de série sur l'étiquette apposée sur le fond de l'appareil.

## Données de contact du service après-vente

Attract Kft.

H-7624 Pécs, Barbakán tér 5 - Hongrie

Tél: +36 72 551 642 (du L. au V. : de 8h à 16h)

E-mail: service@nosiboo.com

## 6. Entretien et stockage

Débranchez l'appareil seulement après la fin du processus de refroidissement ! Déconnectez le tube de l'appareil et de la tête. Derrière la pièce de connexion du boîtier, il y a un filtre spécial. La période recommandée de remplacement du filtre est de 100 utilisations. Pour le remplacement du filtre tournez la pièce de connexion du côté, enlevez le filtre usagé et insérez le filtre de remplacement. Numéro d'ordre du filtre : AC-04-01

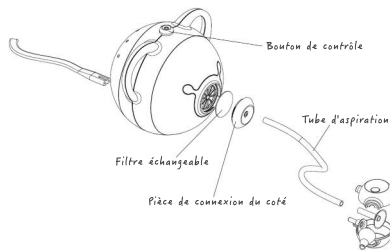


Figure 4 – Remplacement du filtre

En cas de baisse de performance inattendue, il est recommandé de remplacer le filtre avant la période de remplacement suggérée.

Nettoyez le boîtier avec un chiffon sec et doux, n'utilisez pas de détergents ni de produits chimiques !

Gardez l'appareil dans un endroit sec et fermé, à l'abri de la poussière et des dommages (p.ex. dans une armoire) !

Si vous avez plusieurs enfants, il est recommandé d'utiliser des têtes différents en les gardant bien marquées et séparées.

Gardez l'appareil à l'écart de la chaleur !

## 7. Nettoyage

Le nettoyage de la tête Colibri est simple. Après avoir retiré le tube d'aspiration et le bec flexible, le boîtier de la tête peut être séparé en deux parties. Lavez les parties avec de l'eau tiède, puis mettez-les dans une solution désinfectante et séchez-les. Solution désinfectante recommandée: Chicco Disinfectant.

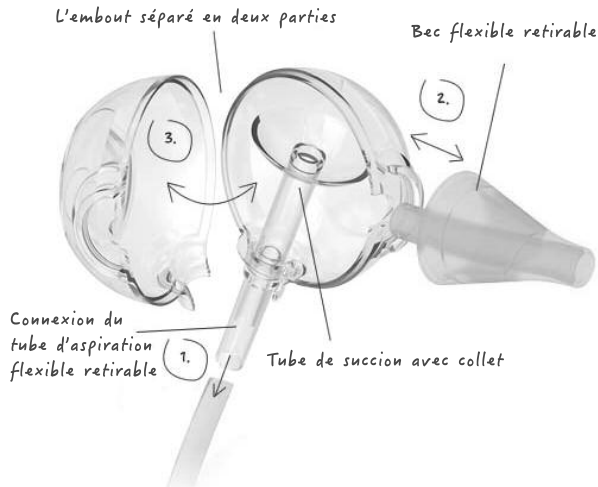


Figure 5 – Nettoyage de la tête Colibri

Avant le nettoyage du tube d'aspiration retirez le tube du boîtier et de la tête Colibri. Lavez le tube dans l'eau tiède, puis mettez-le dans une solution désinfectante et séchez-le.

Après avoir séché les pièces, gardez l'appareil dans un endroit à l'abri des contaminations afin de pouvoir l'utiliser immédiatement la prochaine fois.

Nettoyez le boîtier avec un chiffon sec et doux, n'utilisez pas de détergents ni de produits chimiques.

FR

## 8. Informations importantes concernant la réduction des interférences électromagnétiques

Les équipements de réseau sans fil domestiques, les téléphones portables et sans fil peuvent influencer le fonctionnement des équipements médicaux, à cause des interférences électromagnétiques entre ces équipements. L'interférence électromagnétique peut causer des perturbations dans le fonctionnement des équipements médicaux en créant des situations dangereuses.

A cause des raisons susmentionnées, les équipements médicaux ne doivent pas interférer avec des autres équipements.

Afin de garantir la compatibilité électromagnétique, les exigences nécessaires sont fixées dans des normes. Ces normes définissent le niveau de protection des équipements médicaux et la valeur maximale de la radiation électromagnétique émise par ces équipements.

Le Nosiboo aspirateur nasal adapté aux enfants est conforme aux exigences fixées par la norme EN 60601-1-2:2007. Malgré cela, veuillez suivre les instructions suivantes pendant l'utilisation de l'appareil :

- \* N'utilisez pas des téléphones portables ou sans fil et d'autres équipements émettant des radiations électromagnétiques fortes près de l'appareil ! Sinon, vous risquez le dysfonctionnement de l'appareil, entraînant des risques.
- \* Il est recommandé de garder une distance d'au minimum de 5 mètres entre les équipements. Vérifiez le bon fonctionnement de l'appareil si cette distance est plus courte !

## 9. Environnement

Ne jetez pas l'appareil au terme de son cycle de vie avec les ordures ménagères parce que les produits électroniques sont considérés comme des déchets dangereux. C'est marqué sur l'emballage du produit par le symbole suivant :



La tête Colibri ne présente pas un danger grave pour l'environnement et peut donc être jetée avec les ordures ménagères.

## 10. Spécifications techniques

Max. puissance du moteur : 300 W  
Puissance réglable du moteur : 140-215 W  
Pression différentielle réglable : 0,04-0,12 bar  
Débit d'air réglable : 54 l/min  
Alimentation : 230 V 50/60 Hz  
Classe IP : IP21  
Classe de protection : II  
Type des pièces appliquées : BF  
Pièces appliquées : le boîtier entier  
Type de fonctionnement : non continu  
Durée de fonctionnement : on 1 min / off env. 50 min.  
Durée de fonctionnement continu : max. 80 secondes

Température de déclenchement de l'interrupteur thermique : 95 °C  
Température moyenne du boîtier : 30-35 °C après une minute d'utilisation  
Niveau de bruit : 55-62 dB  
Plage de température : de -10 °C à +40 °C  
Humidité relative : max. 75%  
Cycle de vie prévue pour le boîtier (pièces électriques) : 3 ans  
Cycle de vie prévue pour la tête Nosiboo Colibri : 3 mois  
Diamètre du bec insérable dans le nez : min. 5,6 mm  
Longueur du bec insérable dans le nez : min. 32 mm  
Poids (boîtier) : 972 g  
Dimensions (boîtier, L x H x L) : 200 x 155 x 175 mm  
Dimensions (l'emballage complet) : 180 x 180 x 180 mm

## 11. Accessoires et pièces de rechange

Les pièces de rechange peuvent être commandées auprès du service après-vente :

Attract Kft.

H-7624 Pécs, Barbakán tér 5 - Hongrie

Tél: +36 72 551 642 (du L. au V. : de 8h à 16h)

E-mail: [service@nosiboo.com](mailto:service@nosiboo.com)

**Photo**

**Numéro d'article  
(numéro d'ordre)**

**Description**



AC-05-01 \* bleu  
AC-05-02 \* rose  
AC-05-03 \* vert

Tête Colibri



AC-03-01 \* bleu  
AC-03-02 \* rose  
AC-03-03 \* vert

Tube d'aspiration



AC-04-01

Filtre



AC-01-01

Cordon d'alimentation EU



AC-02-01

Cordon d'alimentation UK



CO-01-01 \* bleu  
CO-01-02 \* rose  
CO-01-03 \* vert

Tête Colibri + Tube d'aspiration

FR



# Carte de garantie internationale

La garantie est valable pour 12 mois à partir de la date d'achat. La garantie peut être seulement validé si l'appareil a été utilisée conformément à sa destination et ne porte pas des dommages visibles. La validation de la garantie peut être effectué avec la facture authentique chez le distributeur officiel de l'appareil. Le distributeur de l'appareil Nosiboo est obligé de traiter les plaintes des clients immédiatement basées sur les aspects inclus dans les chapitres Guide de dépannage et Guide de gestion des dysfonctionnements dans le Manuel d'utilisation. Si les conditions de garantie sont remplies, l'appareil doit être remplacé immédiatement. Le distributeur de l'appareil est obligé de consigner par écrit les mesures de dépannage prises. Cette tâche peut être effectuée dans le cadre de la documentation interne du distributeur ou avec la carte de garantie fournie dans le Manuel d'utilisation. Toutes réclamations doivent contenir le dysfonctionnement découvert, la date précise et le numéro de série sur l'étiquette apposée sur le fond de l'appareil.

*A remplir par le distributeur*

Nom et adresse du distributeur :

Numéro de série de l'appareil Nosiboo :  
(étiquette sur le fond de l'appareil)

Date d'achat :

Type de dysfonctionnement :

Date de dysfonctionnement :

Attestation du distributeur :  
(date, signature et tampon)

*A remplir par le distributeur*

Nom et adresse du distributeur :

Numéro de série de l'appareil Nosiboo :  
(étiquette sur le fond de l'appareil)

Date d'achat :

Type de dysfonctionnement :

Date de dysfonctionnement :

Attestation du distributeur :  
(date, signature et tampon)

*Cette garantie n'influence pas les droits du consommateur réglés par la loi !*

Fabricant et service après-vente :  
Attract Kft.  
H-7624 Pécs, Barbakán tér 5 - Hongrie  
Tél: +36 72 551 642 (du L. au V. : de 8h à 16h)  
E-Mail: service@nosiboo.com

