

**nosiboo<sup>\*</sup>eco<sup>®</sup>**  
manual nasal aspirator

## Mode d'emploi

Aspirateur nasal manuel Nosiboo ECO

FRA



E-Mail: [customerservice@nosiboo.com](mailto:customerservice@nosiboo.com)

Web: [www.nosiboo.eu](http://www.nosiboo.eu)

Tel: +36 72 551 642




**Fabriqué par : ATTRACT KFT.**

H-7622 Pécs, Siklósi út 1/1 Hongrie

Made in EU



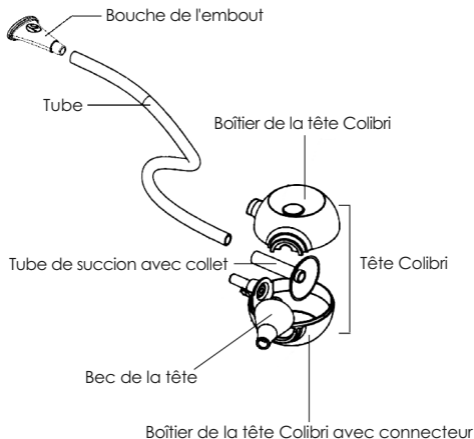

### **Consignes de sécurité**

Si les éventuelles situations dangereuses ci-dessous ne sont pas évitées, des blessures à l'utilisateur voire un accident mortel peuvent se produire.

**Avertissement** – L'appareil peut être utilisé exclusivement pour extraire le mucus nasal du nez d'un enfant. Désinfecter la tête colibri après chaque utilisation. Ne laissez pas les pièces démontées du Nosiboo ECO à la portée des enfants car ils pourraient les avaler. L'appareil ne peut être utilisé que par des adultes. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance à proximité d'enfants ou de personnes ayant des capacités physiques ou mentales réduites. Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement attachées avant d'utiliser l'appareil.

Si des éruptions cutanées ou des rougeurs apparaissent sur le nez de l'enfant après l'utilisation de l'appareil, ne l'utilisez plus ! Consultez un médecin ! Ne pas utiliser l'appareil en cas d'hémophilie, si les vaisseaux sanguins de la muqueuse du septum nasal s'élargissent - en cas de saignements de nez fréquents, en cas de prise d'anticoagulants en cas de malformations congénitales (par ex. fente palatine).

## **1. Utilisation prévue**

Prévention des complications causées par le rhume infantile et accélération du processus de guérison en éliminant le mucus nasal. Recommandé pour les enfants (généralement âgés de moins de 4 ans), qui ne peuvent pas extraire eux-mêmes le mucus nasal en se mouchant le nez. Le vide nécessaire à l'aspiration est créé par la bouche de l'utilisateur (grâce à la conception détachée de manière indirecte).

Les nourrissons doivent être couchés, tandis que les petits enfants doivent être assis dans une position stable durant l'aspiration de leur nez. Placez l'embout buccal dans votre bouche et insérez la bouche de l'embout préalablement désinfecté dans la cavité nasale, en le dirigeant légèrement vers l'œil. Dans cette position, vous pouvez légèrement déplacer le bec de la tête tout en effectuant une aspiration discontinue avec votre bouche à travers le tube. Le point de raccordement du tube doit être dirigé vers le bas pendant l'utilisation. Le mucus nasal sec ou très épais peut être dissous à l'aide de solutions salines. Ne pas utiliser plus de 5 ml de solution à la fois. Patientez quelques minutes après l'utilisation de la solution, puis utilisez l'aspirateur nasal. Le Nosiboo ECO peut contenir jusqu'à 5 ml de liquide fluide. Le liquide aspiré s'accumule sur la paroi interne de la boîte de la tête Colibri et, grâce à sa conception brevetée, le liquide ne peut pas sortir de l'intérieur de la tête Colibri. Il peut donc être utilisé en toute sécurité sans aucun élément filtrant.

## **2. Présentation et mise en service de l'appareil**

1. Nettoyez les pièces de la tête colibri (voir les chapitres Nettoyage et Stockage)
2. Insérez le tube d'aspiration à collet dans la moitié du boîtier de la tête Colibri munie d'un raccord
3. Placez la moitié du boîtier de la tête Colibri sans raccord dans la position correcte
4. Enfoncez l'embout nasal flexible sur la bride correspondante
5. Branchez une extrémité du tube au raccord de la tête Colibri
6. Branchez l'autre extrémité du tube à la bouche de l'embout

L'appareil peut être utilisé plusieurs fois par jour ; l'objectif général est de faciliter la respiration calme de l'enfant. Fréquence d'utilisation suggérée : plusieurs fois par jour si nécessaire, après le réveil, avant de manger et de dormir.

**3. Nettoyage et Stockage** – La tête Colibri peut être démontée après avoir débranché le tube et le bec de la tête. Pour nettoyer la bouche de l'embout, débranchez-la du tube. Ensuite, lavez les pièces dans de l'eau tiède, désinfectez-les dans un liquide désinfectant et laissez-les sécher. Désinfectant conseillé : Désinfectant Chicco. L'appareil doit être rangé dans un lieu clos, à l'abri de la lumière directe du soleil ou des radiateurs.

**4. Environnement** – L'aspirateur nasal manuel Nosiboo ECO ne pose aucun risque pour l'environnement, c'est pourquoi il peut être jeté avec les ordures ménagères.

## **5. Spécifications**

Poids (avec emballage) : 105 g

Dimensions (appareil emballé L x H x P) : 200 x 200 x 50 mm

Durée de service prévue : 3 mois